


# TOUCH BURNER APT<sup>®</sup> 3

## 取扱説明書・保証書

### 各部の名称

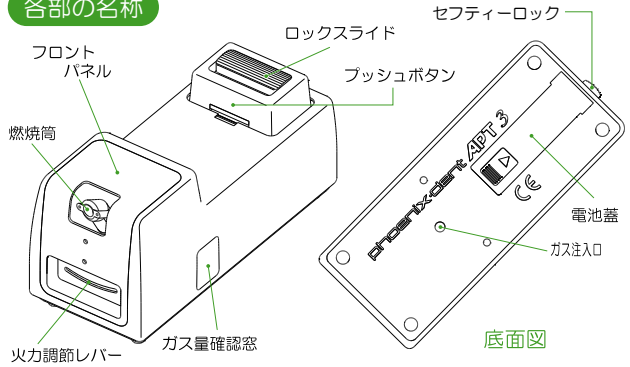

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をお読みください。  
そして、大切に保管してください。



株式会社 フェニックスデント  
〒327-0024 栃木県佐野市電井町 2649-3  
TEL 0283-25-8755

Rev.3

### 特に注意して頂きたい事


- ☆本製品は高温の炎が発生しますので、火傷・火災に十分注意して下さい。
- ☆本体を移動する時は必ず消火を確認し、電池を取り外し、プッシュボタンがロックされていることを確認して下さい。
- ☆可燃物・引火性の高い物などが近くにある場所では使用しないで下さい。
- ☆水平で安定した平らな場所に置いて使用して下さい。
- ☆使用前に燃焼筒内にワックスなどが入っていないことを確認して下さい。
- ☆予想外の着火や火力で炎が出る可能性がありますので、燃焼筒内をのぞき込む必要がある場合は十分注意して下さい。
- ☆エアコンの近くなど空気の流れが強い場所で使用する時は、風で炎が揺らされ本体が過熱されないよう十分注意して下さい。
- ☆換気扇を回すなど換気にご注意下さい。長時間閉め切った部屋で使用すると酸欠や酸素不足による不完全燃焼で一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- ☆本製品を改造、分解はしないで下さい。また、貼ってあるシールをはがさないで下さい。
- ☆ガスを補充する時は専用ガスポンペを使用し、周囲に火気が無いことを確認してからガスを補充して下さい。

### 主な仕様

機種名	アプト・スリー (APT-3)
点火方式	電子着火式
電源	単3乾電池 (DC 1.5V) 1本
外形寸法	幅 59 × 長さ 144 × 高さ 67 (単位 mm)
重量	約 250g
使用燃料	APT-3 専用ガスポンペ (主成分 ブタンガス)
使用環境	温度：5～40℃ 湿度：80% 以下


### 使用方法

#### ☆プッシュボタンのロックについて

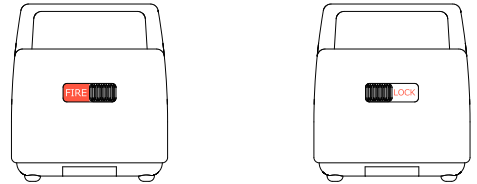

本体後方にあるセフティーロックを移動する事でプッシュボタンのロック・解除を切り替える事ができます。  
「FIRE」の文字が見えている時はプッシュボタンを押して着火する事ができます。「LOCK」の文字が見えている時はプッシュボタンを押す事ができません。

#### ☆連続燃焼操作について

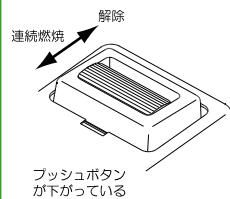

プッシュボタンを押した状態でロックスライドを前方に動かすと連続燃焼になります。  
連続燃焼をやめる場合はロックスライドを後方に動かすとプッシュボタンが上がり消火されます。  
連続燃焼を行う場合は必ず着火・消火の確認を行い火傷や火災に十分気をつけて下さい。

#### ☆電池の取り付け

- ①プッシュボタンをロック状態にして下さい。
  - ②本体底面にある電池蓋を開け単3電池を入れて下さい。
  - ③必ず電池蓋を閉めて下さい。蓋を閉めないと感じ電の恐れがあります。
- ※本体を移動する時、収納する時、また長時間使用しない時は電池を取り外して下さい。

#### ☆着火・消火の手順

- ①プッシュボタンのロックを解除します。
  - ②プッシュボタンを押すと点火します。必ず着火している事を確認して下さい。着火しない場合はすぐにプッシュボタンから手を離し繰り返してもう1・2度点火操作をして下さい。  
◎数回点火操作を繰り返しても着火しない場合は『故障?』をご覧ください。
  - ③火力調節レバーで使いやすい火力に調節して下さい。
  - ④プッシュボタンから手を離すと消火します。
  - ⑤意図しない着火を防ぐため、使用後はプッシュボタンをロック状態にして下さい。
- ※予想外の着火や火力で炎が出る可能性がありますので、燃焼筒内をのぞき込みながらの操作はお止め下さい。

#### ☆火力の調節

- ・本体前面 (フロントパネル) に火力調節レバーがあります。正面から見て右側に動かすと火力が強くなり、左側に動かすと火力が弱くなります。
- ・火力を調節する時、燃焼筒の中をのぞき込まないで下さい。また、火傷・火災に十分注意して火力を調節して下さい。
- ・火力調節レバーがどの位置でも炎が安定する訳ではありません。炎が安定して燃焼する状態に調節して下さい。


## 使用方法 つづき

### ☆使用後の確認

- ・使用後は完全に消火している事を確認して下さい。また使用中、消火直後はフロントパネル周辺や本体が熱くなっている事がありますので火傷などに十分注意して下さい。
- ・使用後はプッシュボタンをロック状態にして下さい。また、長時間使用しない時や収納する時は**安全の為乾電池を取り外して下さい。**

## ガスの充填方法

- ① プッシュボタンをロック状態にし、**電池が取り外されている**ことを確認して下さい。
- ② 本体底面にあるガス注入口を上に向けAPT-3専用ガスポンペを垂直に押し込んで下さい。
- ③ ガス量確認窓からガスの充填量を確認しながら充填して下さい。
  - ◎火気のそばでガスを充填しないで下さい。引火する恐れがあります。
  - ◎充填する時**本体・ガスポンペは手に持って行って下さい。**
  - ◎充填後は5分程度使用しないで下さい。

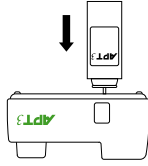


## 燃焼筒の清掃方法

燃焼筒内にワックス等の異物が詰まったりすると着火不良などの不具合が生じます。次の手順に従って清掃して下さい。

燃焼筒の清掃では燃焼筒やフロントパネル等を触ります。着火直後の清掃作業はお止め下さい。燃焼筒等が高温になっており火傷する恐れがあります。


また、フロントパネルや燃焼筒等で怪我をしないよう十分注意して作業して下さい。

- ① 周囲に火気が無いこと、電池が取り外されていること、プッシュボタンをロックしていることを確認して下さい。

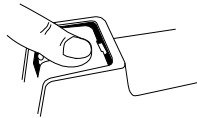


- ② フロントパネルの上部を指で押し下げたまま、本体前方に引いてフロントパネルを外して下さい。

- ③ 燃焼筒の両脇にあるコネクタを外側に引張って外して下さい。

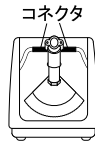

- ④ 燃焼筒に引っかかっているスプリングを燃焼筒から外して下さい。

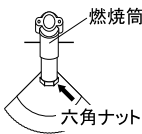

- ⑤ 燃焼筒を指でしっかりと押さえ燃焼筒下部の六角ナット(矢印の部分)を7mmのレンチ等で緩めて、燃焼筒を外して下さい。



- ⑥ 図の矢印部分の小さな穴を綿棒清掃して下さい。また、取り外した燃焼筒は熱湯で流しワックス汚れ等異物を取り除いて下さい。その後燃焼筒をしっかりと乾燥させて下さい。
  - ◎熱湯での火傷に十分注意して下さい。
  - ◎ワックスをそのまま排水口に流すと詰まる恐れがありますので十分注意して下さい。

- ⑦ 上記②～⑤の逆の手順で組み立てて下さい。
  - ◎燃焼筒を取り付ける時は炎の出る方向を確認して下さい。

- ⑧ 必ず安全な場所で動作確認をしてから使用して下さい。

## 故障?と思ったら以下のことを調べて下さい

### ☆スパークしない(火花が飛ばない)

- ◎乾電池をチェックして下さい。(古くなっていませんか?入れる方向はありますか?)
- ◎コネクタが外れていませんか?(燃焼筒の清掃方法③を参照)

### ☆スパークするが着火しない(着火しにくい)

- ◎燃焼筒をチェックして下さい。ワックスや異物が詰まっていますか?何か異物が詰まっている時は取り除いて下さい。(燃焼筒の清掃方法を参照)
- ◎火力調節レバーで火力を調節してみてください。火力が強過ぎたり、弱過ぎたりすると着火しない事や、炎が安定しない事があります。(火力調節レバーがどの位置でも炎が安定する訳ではありません)
- ◎ガスは入っていますか?ガスの残量を本体側面にあるガス量確認窓から確認して下さい。

### ☆すぐに消えてしまう、炎が安定しない

- ◎火力が強過ぎませんか?火力調節レバーで火力を少し弱くしてみてください。(火力調節レバーがどの位置でも炎が安定する訳ではありません)
- ◎ガスは入っていますか?ガスの残量が少なくなると火力が安定しない事があります。
- ◎充填直後は炎が安定しない事があります。ガス充填から約5分は使用をお止め下さい。

### ☆炎が赤火になる

- ◎燃焼筒にワックス等が詰まっていますか?(燃焼筒の清掃方法を参照)

## 保証について

### ●保証内容

製品添付の取扱説明書、注意ラベル、文書の記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。

なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ●保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示がない場合
2. 本保証書の所定事項の未記入、或いは字句が書き換えられた場合
3. お買上げ後の落下等による故障及び損傷
4. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
5. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

## 保証書

製品名	<b>APT-3</b>	★製造番号 <small>(本体の電池取付部分に記載)</small>	
保証期間 (ご購入から1年間)		★ご購入日	

### ★お客様ご記入欄

お名前
ご住所
お電話

### ★取扱販売店・住所・電話

お名前
ご住所
お電話

★ 印の欄は、お客様にご記入頂くものです。

★ 印の欄は、販売店でご記入頂くものです。

### ●修理のご依頼に関して

製品の修理・オーバーホールをご依頼の場合は、**必ず電池を取外し、プッシュボタンをロック状態にして**輸送して下さい。ご不明な点などがございましたら、お取扱店または株式会社フェニックスデントまでご連絡を下さい。