

器械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用バーナ (JMDN コード: 70715000)

アプト・スリー (APT-3)

【警告】


- 1) 本体に布等燃えやすいものをかけないこと。
- 2) ガスバーナに着火する時、本体周囲に燃えやすい物・引火性の高い薬品等が無いことを確認すること。
- 3) 予期せぬ出火が発生する恐れがあります。使用中に患者・使用者が火傷をしないように十分留意すること。
- 4) APT-3 専用ガスポンペを使用すること。
- 5) ガスを充填する時、必ず電池を取り外し、プッシュボタンをロックした状態で行うこと。

【禁忌・禁止】

- 1) 可燃性ガスを燃焼させ高温が発生します。歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士以外が操作しないこと。
- 2) 可燃性ガス使用中に使用しないこと。また、可燃性ガス使用後も十分換気を行った後使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

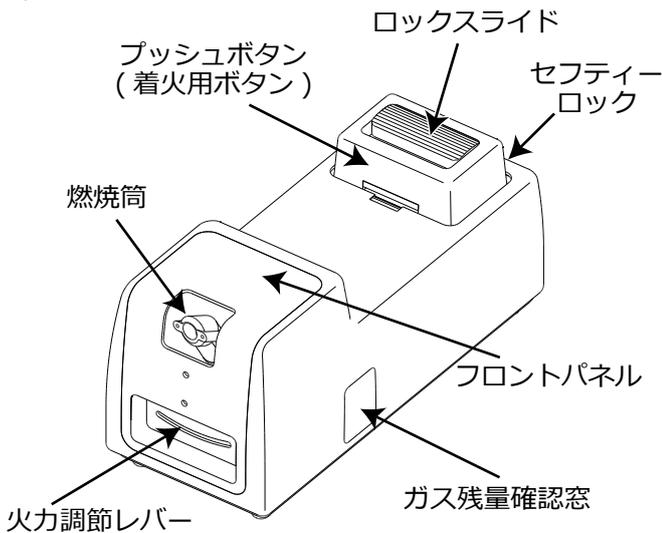

2) 材質・組成

燃焼筒: セラミック
プッシュボタン: ABS
フロントパネル: ステンレス

3) 作動・動作原理

- ① プッシュボタンのロックを解除する。
- ② プッシュボタンを押すとガスバルブが開き着火する。
- ③ プッシュボタンを離すとガスバルブが閉じ消火する。

4) 動作保障条件

- ① 周囲温度 10 ~ 35℃
- ② 相対湿度 30 ~ 75%RH (結露しないこと)

【使用目的又は効果】

ブタンガス等を燃料とするバーナで、歯科用器具の加熱又は消毒に用いるもの。

【使用方法等】

- ① 使用前に燃焼筒内にワックス等が詰まっていないうことを確認する。
- ② プッシュボタンのロックを解除する。
- ③ プッシュボタンを押して着火を確認する。連続燃焼をさせたい場合はプッシュボタンを押したままの状態プッシュボタンをロックする。
- ④ 消火させる場合はプッシュボタンから手を放す。また、連続燃焼の場合はプッシュボタンのロックを解除してからプッシュボタンから手を放す。
- ⑤ 消火を確認し、プッシュボタンをロックする。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意事項

- ① 直射日光・温風等が直接当たらないように注意すること。
- ② 可燃物、可燃性気体、可燃性薬品を使用する際は十分注意すること。また、高濃度酸素環境下では使用しないこと。(爆発、火災の恐れがある)
- ③ 折損等の原因となるので、粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)はしないこと。
- ④ 薬液等が付着した場合、腐食や溶解する恐れがあるので速やかに清拭すること。
- ⑤ 永年使用でない場合でも機能低下の原因となる恐れがあるので、適切な保守点検及び保管を行うこと。

2) 一般的な注意事項

- ① ガス充填後 5 分間は着火しないこと。
- ② 燃焼筒及びその周辺は使用中に加熱される可能性があるため火傷等に注意すること。
- ③ 着火後の炎がエアコン等の風の影響で本体を加熱しないよう注意すること。
- ④ 着火用の火花で感電する可能性及び意図しない着火等で火傷する可能性があるため無闇に燃焼筒周辺を触れないこと。
- ⑤ ガスの充填には APT-3 専用ガスポンペを使用すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法（ガスボンベは除く）

下記条件にて保管すること。

- ①周囲温度 -10 ～ 70℃
- ②相対湿度 10 ～ 85%RH(結露しないこと)
- ③気 圧 700 ～ 1060hPa
- ④環 境 直射日光の当たらない場所
風通しの良い場所

2) 耐用期間

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に限り7年間（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

機器の詳細な保守・清掃・点検方法は、使用前に必ず取扱説明書を参照すること。

<使用者による保守点検事項（日常点検）>

1) 使用前に以下について点検すること。

- ①ガス漏れが無い
- ②本体全体の外観に破損、ヒビ、キズ及び劣化等の異常は無い
- ③外観以外の機能の低下は無い
- ④火口がワックス等で詰まっていない

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1) 製造販売業者

株式会社フェニックスデント 佐野工場
TEL : 0283-25-8755
e-mail : info@phoenix-dent.co.jp

2) 製造業者

株式会社フェニックスデント 佐野工場
TEL : 0283-25-8755